




INFEKTIONS- PRÄVENTION

O&M Halyard bietet ein komplettes Sortiment an Einweglösungen zur Infektionskontrolle, um die Ausbreitung von Infektionen unter Patienten oder Mitarbeitern einzudämmen und das Infektionsrisiko in Untersuchungsbereichen, Laboren und OPf-Sälen zu vermeiden. Dazu gehören Gesichtsschutz-Lösungen, Untersuchungshandschuhe, Kopfbedeckungen, Schuhüberzüge, Schutzmäntel und Bereichsbekleidung.

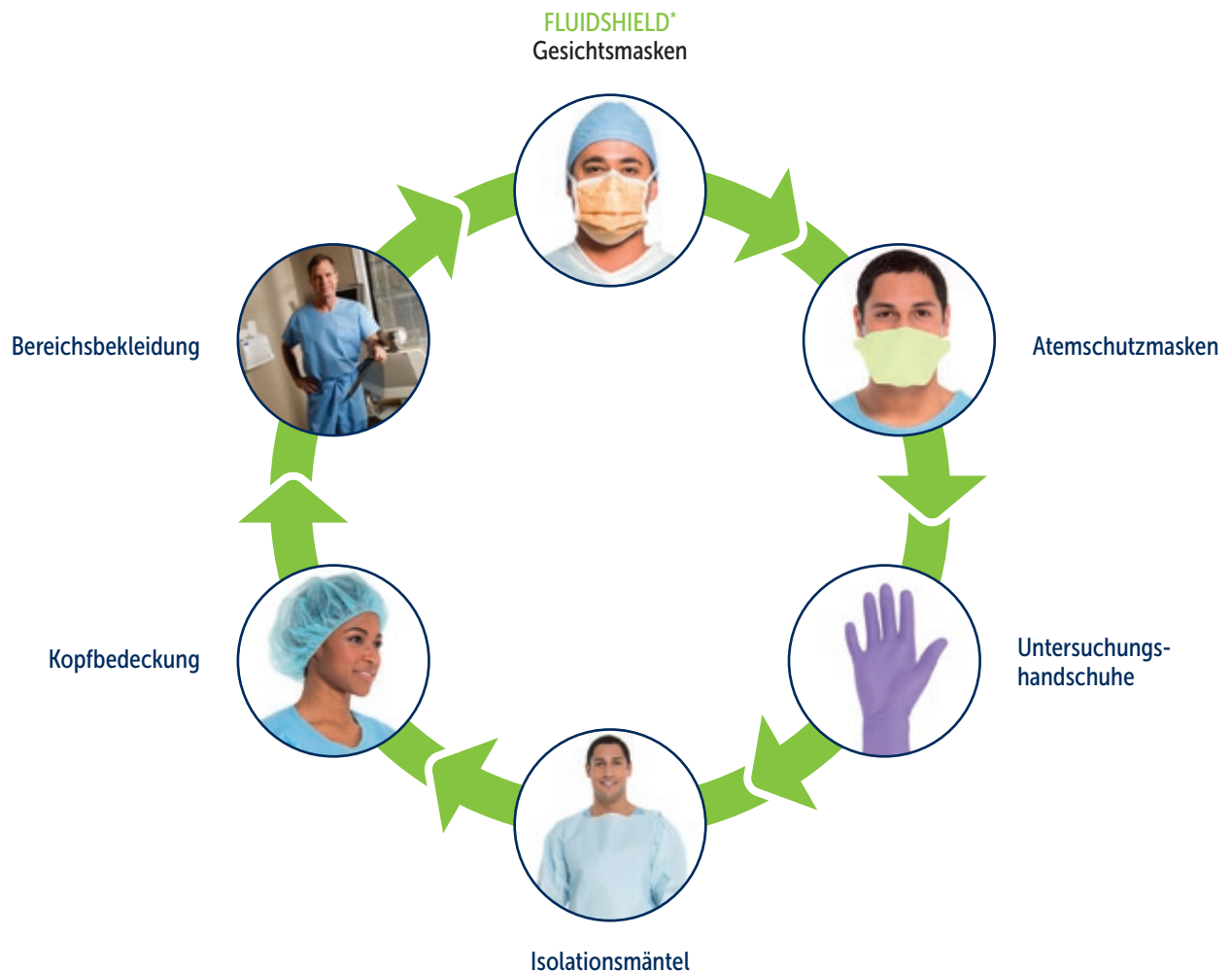

INHALT

| | |
|--|----|
| NITRIL-HANDSCHUHE VON HALYARD – PORTFOLIO | 4 |
| EIGENSCHAFTEN DER HANDSCHUHE | 6 |
| WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGENÜBER CHEMOTHERAPEUTIKA: LEITFADEN DER BARRIEREEIGENSCHAFTEN | 6 |
| WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGENÜBER CHEMIKALIEN: LEITFADEN DER BARRIEREEIGENSCHAFTEN | 8 |
| PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN | 10 |
| WEITERE PRODUKTSPEZIFIKATIONEN & QUALITÄTSSTANDARDS | 12 |
| HILFREICHE INFORMATIONEN | 14 |
| HANDSCHUHE NACH MEDIZINISCHER ABTEILUNG | 14 |
| SMARTPULL*-ENTNAHME | 16 |
| KORREKTES AN- UND AUSZIEHEN UNSTERILER UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE | 17 |
| ARTIKELÜBERSICHT | 18 |

NITRIL-HANDSCHUHE VON HALYARD – PORTFOLIO

FÜR JEDEN BEDARF DER RICHTIGE HANDSCHUH



PURPLE NITRILE* Untersuchungshandschuhe

Maximaler Schutz bei Aufgaben oder Situationen mit hohem Risiko

PURPLE NITRILE* Untersuchungshandschuhe werden häufig von Mitarbeitern im Gesundheitswesen ausgewählt, die auf einen hervorragenden Barrierschutz gegenüber Bakterien, Viren und Chemotherapeutika angewiesen sind. Für maximale Abdeckung und maximalen Schutz sind diese strapazierfähigen Handschuhe in den Längen 240, 310 und 400 mm erhältlich. PURPLE NITRILE* Untersuchungshandschuhe von Halyard sind die von Safeskin hergestellten Originalhandschuhe.



STERLING* Nitril-Untersuchungshandschuhe

Aufgaben mit mittlerem Risiko erfordern einen Standardhandschuh mit der Zuverlässigkeit des STERLING*

STERLING* Nitril-Untersuchungshandschuhe wurden speziell nach dem Vorbild der Passform und Haptik von Latex entwickelt und bieten hohen Tragekomfort und hervorragendes Tastempfinden. Diese Handschuhe bieten langfristigen Barrierschutz und sind in der gesamten Einrichtung vielfältig einsetzbar. Für eine größere Abdeckung und einen höheren Schutz sind diese Handschuhe in den Längen 240 und 310 mm erhältlich.



BASICS* Blue & BASICS* White Nitril-Untersuchungshandschuhe

Aufgaben mit geringem bis mittlerem Risiko erfordern einen günstigen Handschuh ohne Einbußen beim Schutz und Tragekomfort

BASICS* Blue & BASICS* White Nitril-Untersuchungshandschuhe sind dünner, leichter und günstiger als unsere Standard-Nitrilhandschuhe. Die Handschuhe sind für ein breites Aufgabenspektrum geeignet und eine ideale Alternative zu Untersuchungshandschuhen aus Vinyl oder Latex. Tragekomfort und adäquater Barrierschutz sind bei der Nutzung weiterhin gewährleistet.



BLACK-FIRE* Nitril-Untersuchungshandschuhe

Doppelfunktion: zwei Handschuhe in einem

BLACK-FIRE* Nitril-Untersuchungshandschuhe können gewendet werden. Sie kommen entweder als schwarze Handschuhe zum Einsatz oder zeigen sich umgekehrt von ihrer markanten orangefarbenen, glatteren Seite.

ERHÖHTER SCHUTZ

PURPLE NITRILE* Hervorragender Barrierschutz

Latexfrei
Puderfrei
Unsteril/Steril
Höheres Gewicht/stark

Barrierschutz
und optimierte
Leistung

> 240 mm /
310 mm / 400 mm
Länge



STERLING* Nitrile In der gesamten Einrichtung einsetzbar

Latexfrei
Puderfrei
Unsteril
Mittleres Gewicht

Schutz bei
optimiertem
Tastempfinden

> 240 mm / 310 mm
Länge



BASICS* Blue & BASICS* White Nitril-Schutz und Tragekomfort

Latexfrei
Puderfrei
Unsteril
Leicht

Kostengünstig
Bequem
Schützend

> 240 mm Länge



EIGENSCHAFTEN DER HANDSCHUHE



WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGENÜBER CHEMOTHERAPEUTIKA: LEITFADEN DER BARRIEREEIGENSCHAFTEN

Die Produktreihe der HALYARD* Nitril-Untersuchungshandschuhe wurde für den Schutz bei der Handhabung von Chemotherapeutika entwickelt. Die in drei verschiedenen Längen erhältlichen Handschuhe schützen gut und decken den Arm bis hin zur Unterarmmitte ab. Die Reihe der **PURPLE NITRILE* Untersuchungshandschuhe** wurde umfassend für die Verwendung mit Chemotherapeutika getestet. Unsere PURPLE NITRILE* Untersuchungshandschuhe wurden nach der europäischen Norm EN ISO 374-1 und dem US-Standard ASTM D6978 im Hinblick auf ihre Sicherheit geprüft, wenn sie potentiell gefährlichen Chemotherapeutika ausgesetzt sind.

| Chemotherapeutika | PURPLE NITRILE* | PURPLE NITRILE-XTRA* | PURPLE NITRILE MAX* |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | Handschuhlänge >240 mm | Handschuhlänge 310 mm | Handschuhlänge >400 mm |
| | Durchbruchprüfung | Durchbruchprüfung | Durchbruchprüfung |
| Arsentrioxid (1 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Azacitidin (25 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Bendamustin (5 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Bortezomib (1 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Bleomycinsulfat (15 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Busulfan (6 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Carboplatin (10 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Carfilzomib (10 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Carmustin (3,3 mg/ml) | ☒ | ☑ | ☑ |
| Cetuximab (Erbitux) (2 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Cisplatin (1 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Cyclophosphamid (20 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Cytarabin HCL (100 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Cytovene (10 mg/ml) | NICHT GETESTET | ☑ | ☑ |
| Dacarbazin (10 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Daunorubicin HCL (5 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Decitabin (5 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Docetaxel (10 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Doxorubicin HCL (2 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Ellence (2 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Eribulin Mesylat (0,5 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Etoposid (20 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Fludarabin (25 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Fluorouracil (50 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Fulvestrant (50 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Gemcitabin (38 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Idarubicin (1 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Ifosfamid (50 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Irinotecan (20 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Mechlorethamin HCL (1 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Melphalan (5 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |



| PURPLE NITRILE* | PURPLE NITRILE-XTRA* | PURPLE NITRILE MAX* |
|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Handschuhlänge >240 mm | Handschuhlänge 310 mm | Handschuhlänge >400 mm |

| Chemotherapeutika | Durchbruchprüfung | Durchbruchprüfung | Durchbruchprüfung |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Methotrexat (25 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Mitomycin (0,5 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Mitoxantron (2 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Oxaliplatin (2 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Paclitaxel (6 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Paraplatin (10 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Pemetrexed (25 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Pertuzumab (30 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Raltitrexed (0,5 mg/ml) | NICHT GETESTET | ☑ | ☑ |
| Retrovir (10 mg/ml) | NICHT GETESTET | ☑ | ☑ |
| Rituximab (10 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Temsirolimus (25 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| ThioTEPA (10 mg/ml) | ☒ | ☑ | ☑ |
| Topotecan HCL (1 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Trastuzumab (21 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Triclosan (1 mg/ml) | NICHT GETESTET | ☑ | ☑ |
| Trisenox (1 mg/ml) | ☑ | NICHT GETESTET | ☑ |
| Vinblastin (1 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Vincristinsulfat (1 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Vinorelbin (10 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |
| Zoledronsäure (0,8 mg/ml) | ☑ | ☑ | ☑ |

Klassifizierung

| | |
|-------------------|---|
| ☒ NICHT EMPFOHLEN | Diesen Handschuh nicht mit dieser Chemikalie verwenden |
| ⚠ VORSICHT | Dieser Handschuh ist bei sorgfältiger Beachtung der Anwendungsbedingungen für diese Chemikalie geeignet (Durchbruchzeit <59 Min.) |
| ☑ EMPFOHLEN | Dieser Handschuh ist für die Verwendung mit dieser Chemikalie gut geeignet (Durchbruchzeit >60 Min.) |
| NICHT GETESTET | - |

PURPLE NITRILE*: Bei folgenden Chemotherapeutika und Konzentrationen kam es in weniger als 30 Minuten zum Durchbruch. Carmustin (3,3 mg/ml): 1,8 Minuten. ThioTEPA (10,0 mg/ml): 1,6 Minuten. Achtung: Nicht für die Verwendung mit Carmustin und ThioTEPA geeignet.

Vorsicht: Die simulierten Testbedingungen sollten annähernd den ungünstigsten Bedingungen bei der klinischen Anwendung entsprechen. Die Tests wurden an einer einzelnen Schicht des Handschuhmaterials durchgeführt.

Die Verantwortung über die Anwendbarkeit dieser Handschuhe für den beabsichtigten Umgang mit den genannten Chemotherapeutika obliegt dem Anwender. Auf Anfrage sind die Daten zu den Durchbruchzeiten erhältlich.

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGENÜBER CHEMIKALIEN: LEITFADEN DER BARRIEREEIGENSCHAFTEN



Die **HALYARD* STERLING* Nitrile** und **PURPLE NITRILE*** Untersuchungshandschuhe wurden auf ihre Gebrauchstauglichkeit für verschiedene chemische Substanzen gemäß EN ISO 374-1 (EN 16523-1) und ASTM F739-12 geprüft. Dadurch ist gewährleistet, dass Mitarbeiter im Gesundheitswesen immer informiert und adäquat geschützt sind, wenn sie mit potentiell gefährlichen Chemikalien arbeiten.

| | STERLING* Nitrile | PURPLE NITRILE* | PURPLE NITRILE-XTRA* |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | Handschuhlänge >240 mm | Handschuhlänge 310 mm | Handschuhlänge >400 mm |
| Chemikalie | Durchbruchprüfung | Durchbruchprüfung | Durchbruchprüfung |
| Klebebandentferner-Pads | ⚠ | ✓ | ✓ |
| Alkoholische Bouinsche Fixierlösung | ⚠ | ✓ | ✓ |
| Eosine alkoholische oplossing | ⚠ | ⚠ | ⚠ |
| Alkoholisches Eosin | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bleiche | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bouinsche Fixierlösung | ✓ | ✓ | ✓ |
| B-Plus Fixierlösung | ⊘ | ⊘ | ⊘ |
| Carnoy-Lösung | NICHT GETESTET | ✓ | ✓ |
| Chlorhexidingluconat 4 % | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cidex 14 Tage | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cidex OPA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entkalker I | ✓ | ✓ | ✓ |
| EM Fixiermittel | ⚠ | ✓ | ✓ |
| Ethidiumbromid (1 %) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ethylalkohol (95 %) | ⚠ | ⚠ | ⚠ |
| Formalin-Alkohol (auf Formaldehyd getestet) | ⚠ | ⚠ | ✓ |
| Formalin-Alkohol (auf Reagenzalkohol getestet) | ⚠ | ✓ | ✓ |
| Formalin, 10 % gepuffert (auf Formaldehyd getestet) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formalin, 10 % gepuffert (auf Methanol getestet) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Giemsa-Färbelösung | ⚠ | ⚠ | ⚠ |
| Glutaraldehyd 4 % | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hämatoxylin-Färbemittel (Harris-Lösung) | ✓ | ⚠ | ✓ |
| Chlorwasserstoffsäure, 35,5 % | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wasserstoffperoxid, 3 % | ✓ | ✓ | ✓ |
| Isopropylalkohol, 70 % | ⚠ | ⚠ | ✓ |

| | STERLING* Nitrile | PURPLE NITRILE* | PURPLE NITRILE-XTRA* |
|---|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | Handschuhlänge >240 mm | Handschuhlänge 310 mm | Handschuhlänge >400 mm |
| Chemikalie | Durchbruchprüfung | Durchbruchprüfung | Durchbruchprüfung |
| Monsel-Lösung | ⚠ | ⚠ | ⚠ |
| OxyCide-Konzentrat | ⊘ | ⊘ | ⚠ |
| OxyCide, gebrauchsfertig | ✓ | ✓ | ✓ |
| Permaslip Eindeckmedium & Deckglasflüssigkeit | ⚠ | ✓ | ✓ |
| Schnell wirkender Knochenentkalker | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reagenzalkohol | ⊘ | ⊘ | ⊘ |
| Resert XL HLD | ✓ | ✓ | ✓ |
| Natriumhydroxid (40 %) | ⚠ | ⚠ | ⚠ |
| Trichloressigsäure (10 %) | ⚠ | ✓ | ✓ |
| Xylen, 99 % | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aceton | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ethylacetat | ⊘ | ⊘ | ⊘ |
| n-Heptan | ⚠ | ⚠ | ⚠ |
| Schwefelsäure (96 %) | ⚠ | ⚠ | ⚠ |
| Salpetersäure (65 %) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Essigsäure (99 %) | ⚠ | ⚠ | ⚠ |
| Ammoniumhydroxid (25 %) | ⚠ | ⚠ | ⚠ |
| Wasserstoffperoxid (30 %) | ⚠ | ⚠ | ⚠ |
| Formaldehyd (37 %) | ⚠ | ⚠ | ⚠ |
| Incidin Rapid (Isopropanol) | ⚠ | ✓ | ✓ |
| Incidin Foam (Isopropanol & Ethanol) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Incidin Plus (Diethylenglykolmonobutylether & Phenoxyethanol) | NICHT GETESTET | ✓ | NICHT GETESTET |
| Incidin Foam (isopropanol en ethanol) | NICHT GETESTET | ✓ | NICHT GETESTET |
| Incidin Plus (di-ethyleenglycol butylether en fenoxxyethanol) | NICHT GETESTET | ✓ | NICHT GETESTET |

Klassifizierung

| | |
|-------------------|---|
| ⊘ NICHT EMPFOHLEN | Diesen Handschuh nicht mit dieser Chemikalie verwenden |
| ⚠ VORSICHT | Dieser Handschuh ist bei sorgfältiger Beachtung der Anwendungsbedingungen für diese Chemikalie geeignet (Durchbruchzeit <59 Min.) |
| ✓ EMPFOHLEN | Dieser Handschuh ist für die Verwendung mit dieser Chemikalie gut geeignet (Durchbruchzeit >60 Min.) |
| NICHT GETESTET | - |


Diese Handschuhe nicht für Anwendungen mit direktem Kontakt mit aggressiven Chemikalien verwenden, bei denen hochstrapazierfähige Industriehandschuhe erforderlich sind.

Die Verantwortung über die Anwendbarkeit dieser Handschuhe für den beabsichtigten Umgang mit den genannten Chemikalien obliegt dem Anwender.

Auf Anfrage sind die Daten zu den Durchbruchzeiten erhältlich.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Die **Reißkraft** ist ein Indikator für die Festigkeit von Handschuhen. Bemessen wird die Kraft (in Newton), die zum Dehnen des Handschuhs aufgebracht werden muss, bis er reißt. Nach EN 455-2:2015 liegt der geforderte Mindestwert für die Reißfestigkeit von Nitril-Untersuchungshandschuhen bei 6 N. Die HALYARD* STERLING* Nitril- & PURPLE NITRILE* Untersuchungshandschuhe übertreffen alle den geforderten Mindestwert für die Reißfestigkeit. Unsere BASICS* Blue & BASICS* White Nitril-Untersuchungshandschuhe entsprechen mit einem Reißwiderstand von 6 N der Norm.

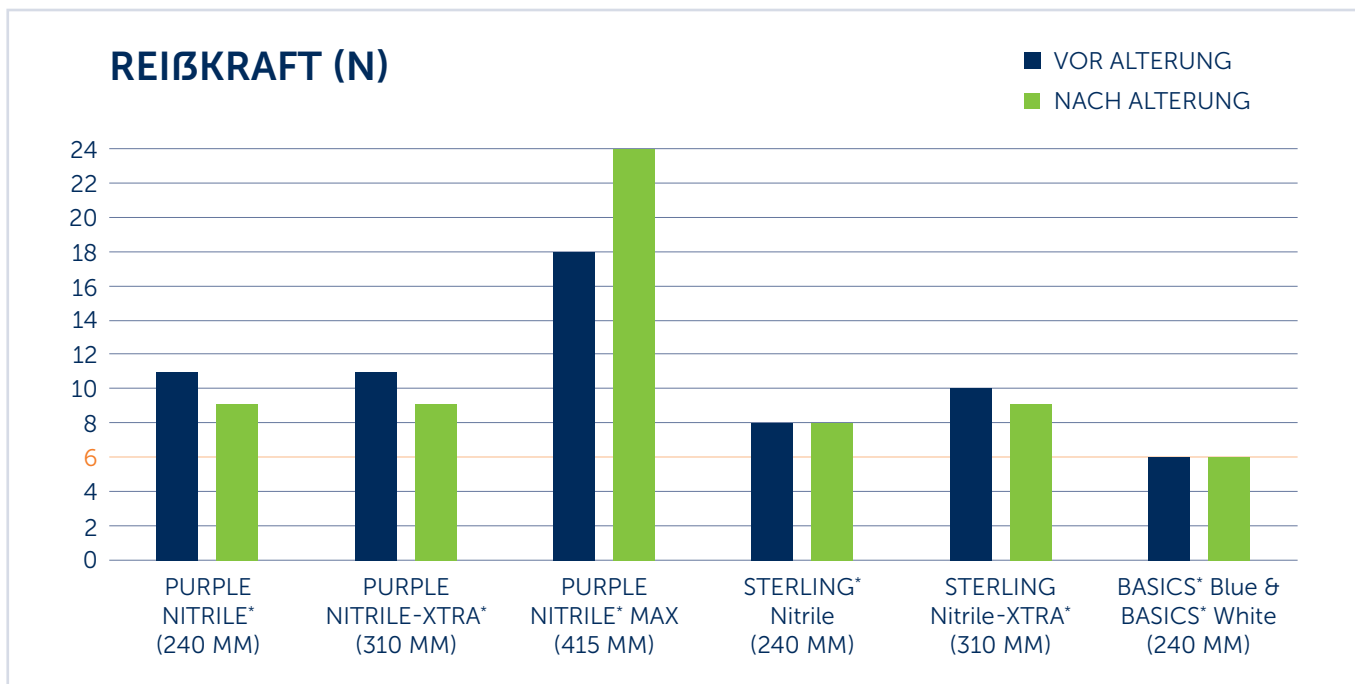


Der **AQL**-Wert drückt die annehmbare Qualitätsgrenze (Acceptable Quality Level) aus und ist ein Indikator für die Handschuhqualität. Je niedriger der AQL-Wert, desto höher die Produktqualität und desto geringer das Vorkommen von Nadellöchern und anderen Defekten, welche die Schutzbarriere verletzen und zu Infektionen führen können.

Die **EN 455-1:2020** beschreibt eine Methode, mit welcher zufällig ausgewählte Handschuhmuster einer Wasserdichtheitsprüfung unterzogen werden. Dabei wird getestet, ob der Handschuh 1000 ml Wasser ohne Undichtigkeit halten kann. Um der EN 455-1:2020 zu entsprechen, muss ein AQL-Wert von 1,5 erreicht werden. Die HALYARD* STERLING* Nitrile & PURPLE NITRILE* Untersuchungshandschuhe übertreffen (hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit) mit einem AQL-Wert von 1,0 alle den geforderten Qualitätsgrenzwert. Unsere Nitril-Untersuchungshandschuhe BASICS* Blue & BASICS* White weisen einen AQL-Wert von 1,5 auf.







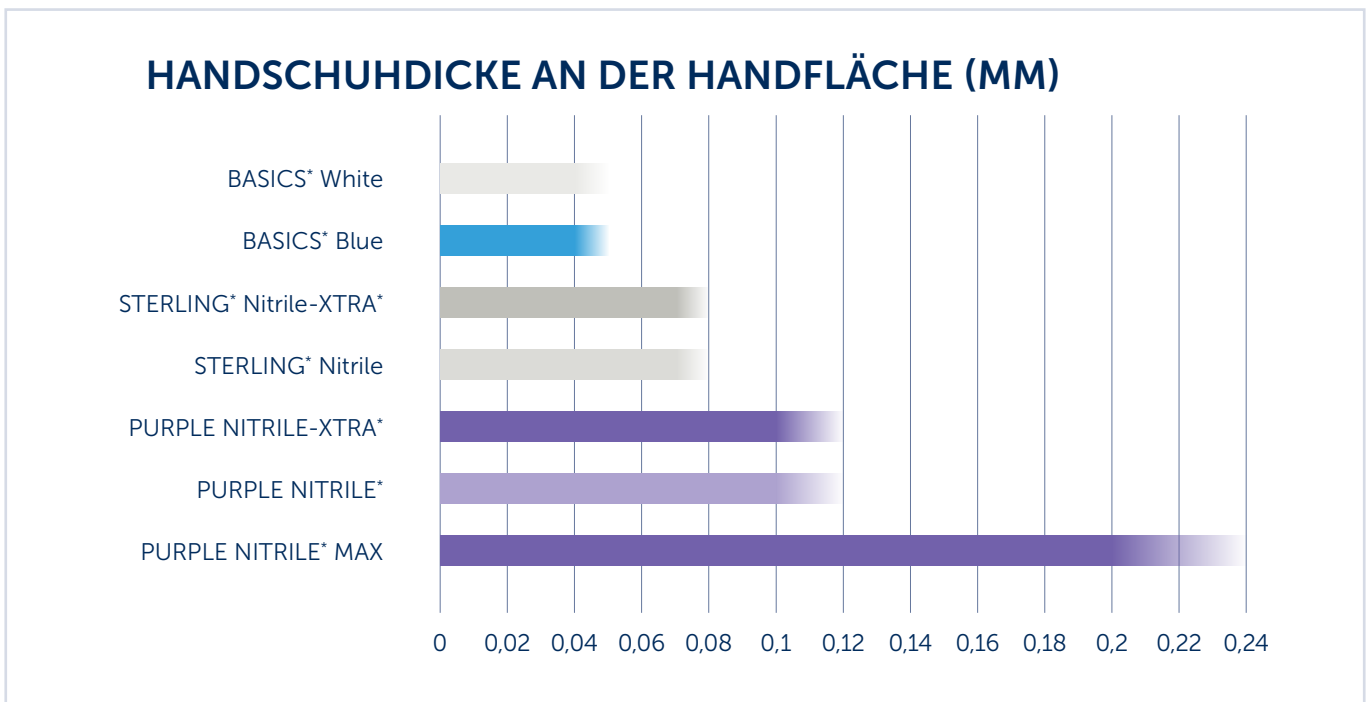

Die **Dicke des Handschuhs** an der Handfläche ist eine Metrik zur Bestimmung des Tastempfindens und des Barrierschutzes. Die Beständigkeit dieser Metrik ist maßgeblich für die Strapazierfähigkeit und den Schutz vor Permeation der Chemikalie. Das nachstehende Diagramm zeigt die Dicke an der Handfläche der einzelnen HALYARD* Handschuhe nach Produktfamilie.







WEITERE PRODUKTSPEZIFIKATIONEN & QUALITÄTSSTANDARDS

Maßangaben für die Handschuhdicke

| |  PURPLE NITRILE* |  PURPLE NITRILE-XTRA* |  PURPLE NITRILE* MAX |  STERLING* Nitrile |
|----------------------|---|--|---|---|
| Mittelfinger | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,28 mm | 0,09 mm |
| Handfläche | 0,13 mm | 0,12 mm | 0,24 mm | 0,08 mm |
| Bund | 0,09 mm | 0,11 mm | 0,15 mm | 0,06 mm |
| Durchschnittl. Länge | > 240 mm | 310 mm | 415 mm | > 240 mm |

Produktspezifikationen – Handflächenbreite

| |  PURPLE NITRILE* |  PURPLE NITRILE-XTRA* |  PURPLE NITRILE* MAX |  STERLING* Nitrile |
|---------|---|--|---|---|
| X-Small | 70 mm | 70 mm | - | 70 mm |
| Small | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Medium | 95 mm | 95 mm | 100 mm | 95 mm |
| Large | 110 mm | 110 mm | 111 mm | 110 mm |
| X-Large | 120 mm | 120 mm | 121 mm | 120 mm |

Qualitätsstandards

| | EN 455-1:2020 | EN ISO 374-1:2016 | EN 420:2003 +A1:2009 | Produkt mit CE-Kennzeichnung gemäß Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstungen | Für den Umgang mit Lebensmitteln freigegeben | Produkt mit CE-Kennzeichnung gemäß Verordnung (EU) 2017/745 für Medizinprodukte | Qualitätssicherungssystem (Produktionsstätten) |
|-------------------------|---------------|-------------------|----------------------|--|--|---|--|
| PURPLE NITRILE* | ✓ | ✓ | ✓ | Produktklasse: PSA Kategorie III | - | Produktklasse: I | ISO 13485 |
| PURPLE NITRILE-XTRA* | ✓ | ✓ | ✓ | Produktklasse: PSA Kategorie III | - | Produktklasse: I | ISO 13485 |
| PURPLE NITRILE* MAX | ✓ | ✓ | ✓ | Produktklasse: PSA Kategorie III | - | Produktklasse: I | ISO 13485 |
| PURPLE NITRILE* Sterile | ✓ | - | - | - | - | Produktklasse: I – steril | ISO 13485 |
| STERLING* Nitrile | ✓ | ✓ | ✓ | Produktklasse: PSA Kategorie III | ✓ | Produktklasse: I | ISO 13485 |

Maßangaben für die Handschuhdicke



STERLING®
Nitrile-XTRA®



BASICS® Blue &
BASICS® White



BLACK-FIRE®

| | STERLING® Nitrile-XTRA® | BASICS® Blue & BASICS® White | BLACK-FIRE® |
|----------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|
| Mittelfinger | 0,11 mm | 0,07 mm | 0,14 mm |
| Handfläche | 0,08 mm | 0,05 mm | 0,10 mm |
| Bund | 0,07 mm | 0,04 mm | 0,09 mm |
| Durchschnittl. Länge | 310 mm | > 240 mm | > 240 mm |

Produktspezifikationen - Handflächenbreite



STERLING
Nitrile-XTRA®



BASICS® Blue &
BASICS® White



BLACK-FIRE®

| | STERLING Nitrile-XTRA® | BASICS® Blue & BASICS® White | BLACK-FIRE® |
|---------|---------------------------|---------------------------------|-------------|
| X-Small | 70 mm | 75 mm | 70 mm |
| Small | 80 mm | 85 mm | 80 mm |
| Medium | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
| Large | 110 mm | 106 mm | 110 mm |
| X-Large | 120 mm | 116 mm | 120 mm |

Qualitätsstandards

| | EN 455-1:2020 | EN ISO 374-1:2016 | EN 420:2003 +A1:2009 | Produkt mit CE-Kennzeichnung gemäß Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstungen | Für den Umgang mit Lebens- mitteln freigegeben | Produkt mit CE-Kennzeichnung gemäß Verordnung (EU) 2017/745 für Medizinprodukte | Qualitäts- sicherungs- system (Produktions- stätten) |
|---------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|---|--|---|--|
| STERLING Nitrile-XTRA® | ✓ | ✓ | ✓ | Produktklasse: PSA Kategorie III | ✓ | Produktklasse: I | ISO 13485 |
| BASICS® Blue & BASICS® White | ✓ | ✓ | ✓ | Produktklasse: PSA Kategorie III | ✓ | Produktklasse: I | ISO 13485 |
| BLACK-FIRE® | ✓ | ✓ | ✓ | Produktklasse: PSA Kategorie III | ✓ | Produktklasse: I | ISO 13485 |

HILFREICHE INFORMATIONEN

HANDSCHUHE NACH MEDIZINISCHER ABTEILUNG

Die Wahl des richtigen Handschuhs für das voraussichtliche Risiko ist von entscheidender Bedeutung für die tägliche Arbeit von Mitarbeitern im Gesundheitswesen.

Verabreichung von Chemotherapeutika – Intensivversorgung – Ambulanz

Aufgaben mit hohem Risiko erfordern in der Regel Handschuhe mit hohem Schutz

| BASICS [*] Blue & BASICS [*] White | STERLING [*] Nitrile | STERLING [*] Nitrile-XTRA [*] | PURPLE NITRILE [*] | PURPLE NITRILE-XTRA [*] | PURPLE NITRILE [*] Steril |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| - | - | - | ✓ | ✓ | - |

Geburtshilfe/GYN – Dermatologie – Wundversorgung – Kleine oder nicht-invasive Eingriffe – Verbrennungsstation

Aufgaben mit hohem Risiko erfordern in der Regel Handschuhe mit hohem Schutz

| BASICS [*] Blue & BASICS [*] White | STERLING [*] Nitrile | STERLING [*] Nitrile-XTRA [*] | PURPLE NITRILE [*] | PURPLE NITRILE-XTRA [*] | PURPLE NITRILE [*] Steril |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| - | - | - | - | - | ✓ |

Gesamte Einrichtung – Intensivstation – OP – Apotheke – Labor

Aufgaben mit mittlerem Risiko erfordern unter Umständen Standardhandschuhe mit der Zuverlässigkeit des STERLING^{*}

| BASICS [*] Blue & BASICS [*] White | STERLING [*] Nitrile | STERLING [*] Nitrile-XTRA [*] | PURPLE NITRILE [*] | PURPLE NITRILE-XTRA [*] | PURPLE NITRILE [*] Steril |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |

Phlebotomie – Allgemeine Patientenpflege & Transport – Routine-Mundpflege

Aufgaben mit geringem Risiko erfordern oft Handschuhe, die sowohl kostengünstig sind als auch den nötigen Schutz und Tragekomfort bieten

| BASICS [*] Blue & BASICS [*] White | STERLING [*] Nitrile | STERLING [*] Nitrile-XTRA [*] | PURPLE NITRILE [*] | PURPLE NITRILE-XTRA [*] | PURPLE NITRILE [*] Steril |
|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |

Die aufgeführten Aufgaben sind typische Anwendungsbeispiele. Die finale Entscheidung darüber, welcher Handschuh sich jeweils am besten für die durchzuführende Aufgabe eignet, obliegt jedoch dem Anwender.



SMARTPULL* ENTNAHME



Das HALYARD* SMARTPULL* System verfügt zur leichteren Entnahme und zur Vermeidung unnötigen Abfalls über zwei Öffnungen!



38,2 % WENIGER
ABFALL

Die Entnahmebox ist mit zwei separaten Öffnungen ausgestattet. Die erste, kleinere Öffnung wird verwendet, wenn die Spenderbox noch voll ist. So werden nicht zu viele Handschuhe gleichzeitig herausgezogen, die eventuell herunterfallen und dadurch unbrauchbar werden und entsorgt werden müssen. Ist die Box halbleer, ermöglicht die zweite, größere Öffnung eine leichtere Entnahme der Handschuhe.

Die Spenderboxen unserer PURPLE NITRILE*, STERLING* Nitril, BASICS* Blue & BASICS* White Nitril-Untersuchungshandschuhe sind mit diesem patentierten Entnahmesystem ausgestattet.

GEBRAUCHSANWEISUNG




SCHRITT 1

Den perforierten Kartonabschnitt 1 entfernen



Durch die kleinere Öffnung wird die unbeabsichtigte Entnahme mehrerer Handschuhe und damit unnötiger Abfall vermieden.

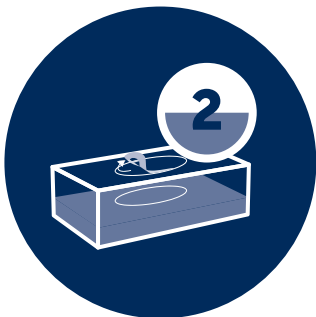

SCHRITT 2

Leert sich die Spenderbox und es wird schwieriger hineinzufassen, den perforierten Kartonabschnitt 2 entfernen



Die weitere Entnahme erfolgt wie bei einer herkömmlichen Handschuhbox.

Das SMARTPULL* Entnahmesystem gibt es für die Boxen unserer Handschuhe mit Standardlänge (240 mm).

KORREKTES AN- UND AUSZIEHEN UNSTERILER UNTERSUCHUNGS- HANDSCHUHE

ANZIEHEN



01
Vor dem Anziehen der Handschuhe grundsätzlich die Hände waschen.



02
Einen Handschuh nur am Bund aus der Original-Spenderbox entnehmen.



03
Den Handschuh mit einer Hand an seiner Öffnung festhalten und Finger und Daumen der anderen Hand in den Handschuh schieben.



04
Den Handschuh in Richtung Handgelenk ziehen, um ihn vollständig anzuziehen. Nur an den Knöcheln hochziehen, um den Handschuh nicht mit Fingernägeln zu beschädigen.



05
Den zweiten Handschuh mit der bloßen Hand aus der Spenderbox nehmen und nur am Bund festhalten.



06
Den Handschuh an seiner Öffnung festhalten und Finger und Daumen in den Handschuh schieben. Den Handschuh an den Knöcheln der behandschuhten Hand in Richtung Handgelenk ziehen.

AUSZIEHEN



01
Mit Ihrer dominanten Hand den Handschuh der anderen Hand außen am Bund fassen und abziehen. Dabei stülpen Sie die Innenseite des Handschuhs nach außen.



02
Den ausgezogenen Handschuh mit Ihrer noch behandschuhten Hand festhalten.



03
Zwei Finger der bloßen Hand am Handgelenk unter den Bund des noch angezogenen Handschuhs schieben.



04
Den zweiten Handschuh von Ihrer Hand schieben, dabei seine Innenseite nach außen und über den ersten Handschuh stülpen.



05
Die Handschuhe im dafür vorgesehenen Abfallbehälter entsorgen.



06
Nach dem Ausziehen der Handschuhe die Hände gründlich waschen.

ARTIKELÜBERSICHT

| ARTIKELÜBERSICHT | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Beschreibung | Verpackung | Artikelnummer nach Größe | | | | |
| | | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large |
| PURPLE NITRILE* Untersuchungshandschuhe | 100 Handschuhe/Box 10 Boxen/Karton | 52000M | 52001M | 52002M | 52003M | -- |
| | 90 Handschuhe/Box 10 Boxen/Karton | -- | -- | -- | -- | 52004M |
| PURPLE NITRILE-XTRA* Untersuchungshandschuhe | 50 Handschuhe/Box 10 Boxen/Karton | 50600M | 50601M | 50602M | 50603M | 50604M |
| PURPLE NITRILE* MAX | 50 Handschuhe/Box 8 Boxen/Karton | -- | 47195 | 47196 | 47197 | 47198 |
| PURPLE NITRILE* Sterile Untersuchungshandschuhe | 50 Handschuhe/Box 4 Boxen/Karton | -- | 52201M | 52202M | 52203M | -- |
| STERLING* Nitrile Untersuchungshandschuhe | 200 Handschuhe/Box 10 Boxen/Karton | 13938 | 13940 | 13941 | 13942 | -- |
| | 170 Handschuhe/Box 10 Boxen/Karton | -- | -- | -- | -- | 13943 |
| STERLING* Nitrile-XTRA* Untersuchungshandschuhe | 100 Handschuhe/Box 10 Boxen/Karton | 44286 | 44287 | 44288 | 44289 | 44290 |
| BASICS* Blue Nitrile Untersuchungshandschuhe | 200 Handschuhe/Box 10 Boxen/Karton | 44749 | 44750 | 44751 | 44752 | -- |
| | 170 Handschuhe/Box 10 Boxen/Karton | -- | -- | -- | -- | 44753 |
| BASICS* White Nitrile Untersuchungshandschuhe | 200 Handschuhe/Box 10 Boxen/Karton | 44740 | 44741 | 44742 | 44743 | -- |
| | 170 Handschuhe/Box 10 Boxen/Karton | -- | -- | -- | -- | 44744 |
| BLACK-FIRE* | 150 Handschuhe/Box 10 Boxen/Karton | 45256 | 45257 | 45258 | 45259 | -- |
| | 140 Handschuhe/Box 10 Boxen/Karton | -- | -- | -- | -- | 45260 |



† Operationssaal

Weitere Informationen erhalten Sie über unseren
O&M Halyard Kundendienst:

DE (gebührenfrei)

Tel: 0800 071 35 52 – Fax: 0800 100 68 14

kundendienst@hyh.com

* Eingetragenes Warenzeichen oder Marke von O&M Halyard oder verbundenen Unternehmen. Die Farbe GREY ist ein eingetragenes Warenzeichen oder eine Marke von O&M Halyard oder verbundenen Unternehmen. Die Farbe PURPLE ist ein eingetragenes Warenzeichen oder eine Marke von O&M Halyard oder verbundenen Unternehmen. Die Farbe Orange ist ein eingetragenes Warenzeichen oder eine Marke von O&M Halyard oder verbundenen Unternehmen. ©2018, 2023. Alle Rechte vorbehalten.
HC288-04-DE COPY-01741

www.halyardhealth.de